



Ruban Indicateur

Avec indicateur de processus pour emballages

Application

Le ruban adhésif GKE Steri-Record® est utilisé pour sceller les emballages de stérilisation fabriqués à partir de tissus tissés ou non tissés ou de films plastiques en cellulose. Le ruban autoclave ou indicateur est disponible avec un indicateur de processus pour les processus de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou au peroxyde d'hydrogène et est conçu pour sécuriser l'emballage avec du ruban adhésif sur le dessus des paquets. Tous les indicateurs de processus placés sur le dessus d'un emballage fournissent des informations logistiques indiquant que l'emballage a été exposé à un processus de stérilisation à condition que la couleur de l'indicateur ait changé pour prendre la couleur finale. Selon les normes internationales, tous les chargements stérilisés doivent contenir un indicateur de suivi du processus afin de différencier les produits stérilisés des produits non stérilisés. L'indicateur de processus n'est pas conçu pour être un indicateur de contrôle de la stérilisation.

Il est bien connu que les conditions de stérilisation à l'intérieur des produits emballés ou des dispositifs creux sont absolument différentes des conditions à l'extérieur. L'application d'un ruban indicateur de processus ne remplace donc pas les indicateurs de type 5 ou 6 à l'intérieur de chaque emballage. Un indicateur de processus sert exclusivement d'information logistique pour différencier les produits stérilisés de ceux qui ne le sont pas.

Description du produit

Les rubans adhésifs GKE Steri-Record® sont disponibles pour contrôler les processus de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou au peroxyde d'hydrogène. Les rubans sont disponibles en rouleaux avec une âme de 3", d'une longueur de 50 m et d'une largeur de 19 mm. Leur adhérence est testée sur différents matériaux d'emballage.

Caractéristiques de Performance

La bande contient des lignes indicatrices de processus conformément à la norme EN ISO 11140-1 type 1 pour fournir des informations logistiques si l'emballage ou le conteneur a passé un processus de stérilisation ou non.

Information de commande

Art. No.	Quantity [rolls]	Product Code	Sterilization Process	Indicator Colour	
				Before Sterilization	After Sterilization
211-354	10	C-S-L-1-AT	Vapeur	Jaune	Noir
211-355	50				

212-354	10	C-E-L-1-AT	Oxyde Ethylène	Rouge	Vert
212-355	50				
214-354	2	C-V-L-1-AT	Hydrogen peroxide	Bleu	Rose
214-355	10				

GKE-GmbH | Auf der Lind 10 | 65529 Waldems | Germany
mail info@gke.eu | **web** www.gke.eu